

# Gebrauch des NYDA® Läusekamms

**Zur Diagnose:** Das gesamte Kopfhaar eines jeden Familienmitgliedes sollte mit dem NYDA® Läusekamm auf lebende Läuse und Larven untersucht werden.

## Was gesucht wird:

**Läuse:** grau bis bräunlich, groß wie ein Sesamkorn, geschlechtsreif

**Larven:** kleine, gerade geschlüpfte Läuse, nicht vermehrungsfähig

**Nissen:** Eier der Laus, weiß bis bräunlich, sandkorngroß, oval. Im Unterschied zu Schuppen kleben sie fest am Haar. Sind sie weiter als 1 cm von der Kopfhaut entfernt, schlüpfen meist keine Larven mehr.

**Im Rahmen der Behandlung:** Festgestellter Kopflausbefall sollte unbedingt mit einem effektiven Kopflausmittel therapiert werden. Alle betroffenen Personen am selben Tag behandeln, um Neuansteckung zu vermeiden. Unsere Empfehlung: NYDA® gegen Läuse und Nissen – hoch wirksam und gut verträglich. Bereits nach der ersten Einwirkzeit des NYDA® Kopflausmittels können die toten Läuse und Larven mit Hilfe des NYDA® Läusekamms ausgekämmt werden.

**Hinweis:** Im Haar verbleibende Nissen sind nach der kompletten Behandlung mit dem Kopflausmittel NYDA® meist abgetötet und nicht mehr ansteckend.



## Anwendung des NYDA® Läusekamms:

1. Das Haar sorgfältig bürsten und mögliche Knoten lösen.
2. Die Haare immer wieder scheiteln und Strähnen bilden.
3. Wichtig: Den Kamm so in die Hand nehmen, dass die Schriftseite leicht schräg zum Kopf zeigt. So können die Läuse besser entdeckt und ausgekämmt werden.
4. An der Kopfhaut beginnen und Strähne für Strähne den Kamm langsam zu den Spitzen ziehen.
5. Nach jedem Durchkämmen den Kamm auf Läuse und Larven kontrollieren und diese ggf. sorgfältig entfernen. Am besten mit einem Papiertuch.

G. Pohl-Boskamp  
GmbH & Co. KG  
Kieler Straße 11  
25551 Hohenlockstedt  
Telefon: 0 48 26 / 59-0  
Telefax: 0 48 26 / 59-109

Hersteller:  
KSL Consulting  
Ramløsevej 25  
DK - 3200 Helsingø  
Dänemark

882310041



PZN -6968091

POHL BOSKAMP 

730000101/1

